



PROTOCOLO DICOM

Protocolo de tomografia computadorizada para reconstrução volumétrica de crânio.

Para maior precisão no planejamento é desejável que o exame tenha sido realizado há no máximo 6 meses

Plano de corte	Axial
Scout view	Lateral
Nível de corte	Vértebra C1 até através do vértice cranial
Angulação do gantry	0 (zero) graus
Técnica de aquisição	Serial ou Helicoidal
Largura dos cortes	1/1 mm
Configurações de exposição	120 kV - 250 mA
FOV	250
Algoritmo de aquisição	Janela para tecido ósseo
Matriz de aquisição das imagens	512 x 512